


# 1 JAK PRAWIDŁOWO POBRAĆ PRÓBKĘ MLEKA

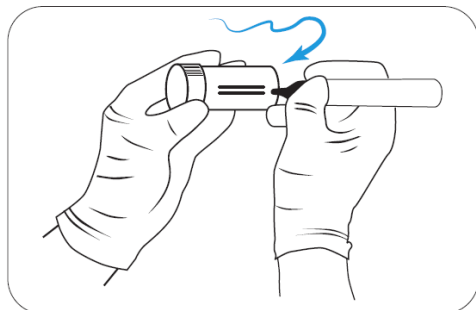

## 1 | OZNACZ

Na próbce do pobierania mleka zapisz numer krowy, ćwiartkę i datę pobrania.


Nałóż jednorazowe rękawiczki.



## 2 | WYCZYŚĆ STRZYK


Wyczyść dokładnie strzyk chusteczką do czyszczenia wymion lub bawełnianym wacikiem nasączonym roztworem dezynfekującym.

Wymieniaj chusteczkę/wacik na nowy, aż strzyk będzie czysty.

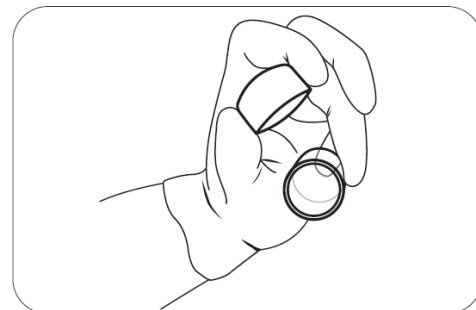

## 3 | PRZYGOTUJ PROBÓWKĘ


Odkręć nakrętkę uważając, by nie dotknąć jej wewnętrznej powierzchni. Trzymaj nakrętkę między kciukiem, a palcem wskazującym, wewnętrzną stroną do dołu. Probówkę, do momentu rozpoczęcia pobierania mleka, również utrzymuj do góry dnem, tak by nie trafiły do niej żadne zanieczyszczenia.

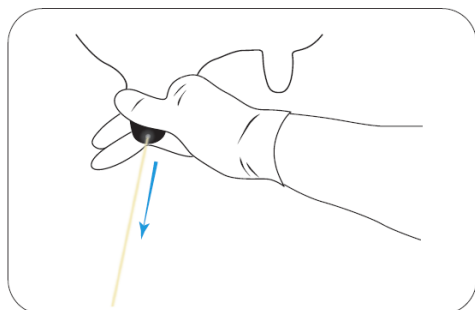

## 4 | ZDÓJ

Zdój i zutylizuj pierwsze 2-3 strugi mleka.

Uwaga: Mleko powinno trafić do odpowiedniego pojemnika. Nie wolno zdając bezpośrednio na podłogę czy ściółkę.

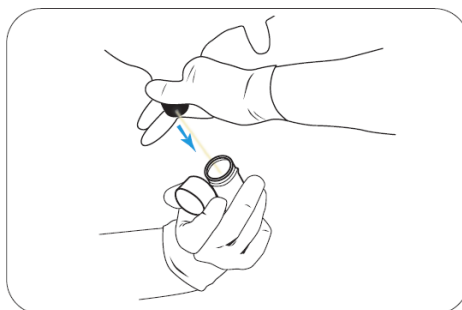

## 5 | POBIERZ MLEKO

Trzymając probówkę pod kątem 45 stopni, napełnij ją do połowy mlekiem. Upewnij się, że do próbki nie dostały się żadne zanieczyszczenia. Zamknij probówkę.




## 6 | ROZPOCZNIJ TEST LUB ODPOWIEDNIO PRZECHOWUJ PRÓBKĘ

Rozpocznij Mastatest tego samego dnia lub ewentualnie włóż próbkę do lodówki. Próbkę należy przechowywać w lodówce w temperaturze nieprzekraczającej 5°C i nie dłużej niż 48 godzin lub zamrozić.

- Ważne żeby próbkę mleka do badania pobrać czysto i nie doprowadzić do jej kontaminacji
- Używaj zawsze czystych rękawic
- Utrzymuj wszystkie blaty, na których pracujesz w czystości. Dezynfekuj je odpowiednimi środkami


- Utrzymuj produkt w bezpiecznej odległości od dzieci
- Produkt weterynaryjny przeznaczony do badania prób pobranych od zwierząt
- Zużyty wkład testowy umieść w odpowiednim pojemniku, a następnie przekaż do utylizacji

## 2 JAK PRZYGOTOWAĆ ANALIZĘ MASTATEST

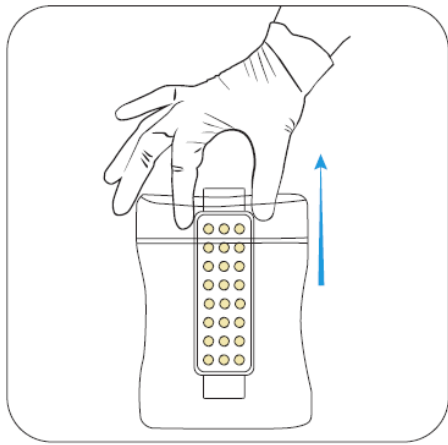


### 1 | PRZYGOTUJ WKŁAD

Założ jednorazowe rękawiczki, a następnie wyjmij wkład testowy z opakowania.

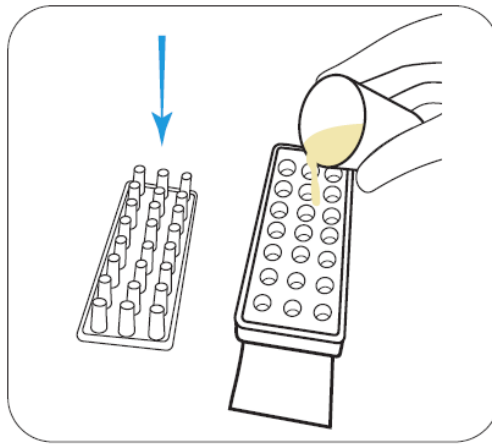


### 2 | NAPEŁNIJ WKŁAD MLEKIEM

Zdejmij pokrywkę i połóż ją wypustkami do góry na czystej, suchej powierzchni. Wypełnij wkład do połowy mlekiem.

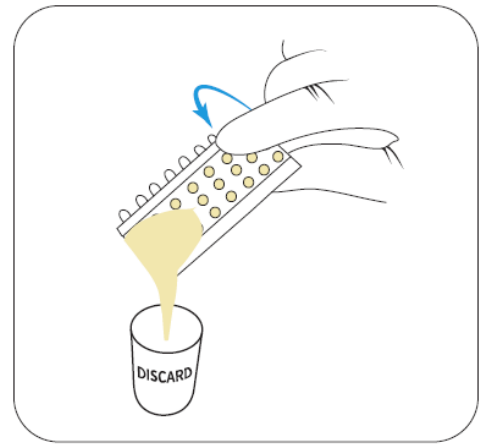


### 3 | USUŃ NADMIAR MLEKA

Odlej nadmiar mleka z wkładu. Nie wlewaj go z powrotem do probówki z pobranym do testów mlekiem.

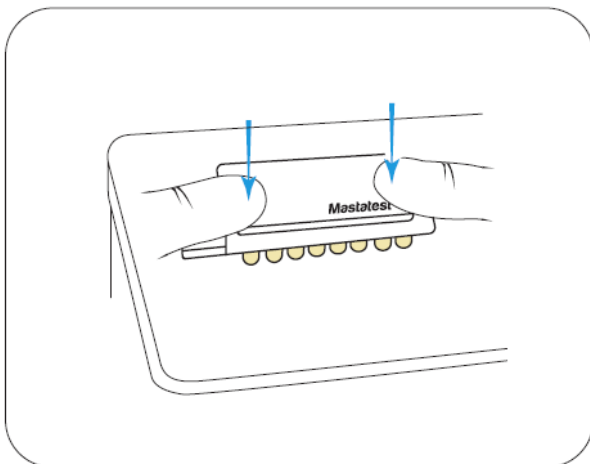


### 4 | ZAMKNIJ WKŁAD

Nałóż pokrywkę (upewnij się, że jest w odpowiednim miejscu) i dociśnij do wkładu w celu dokładnego zamknięcia testu.

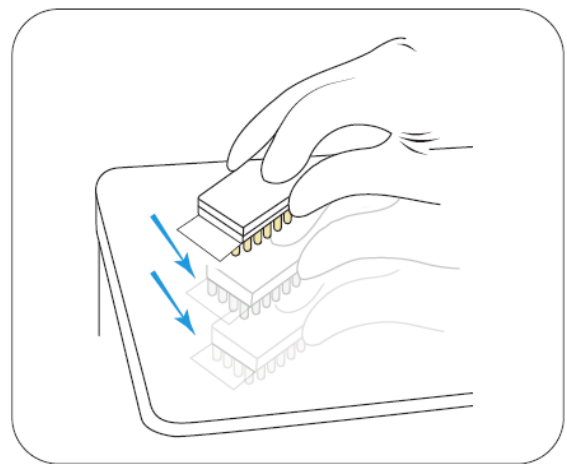


### 5 | DELIKATNIE POSTUKAJ WKŁADEM

Ważne, żeby 2-3-krotnie lekko uderzyć wkładem o powierzchnię. Pozwoli to pozbyć się ewentualnych pęcherzyków powietrza.

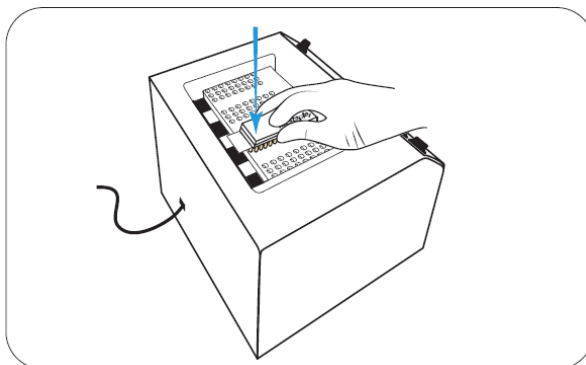

### 4 | UMIEŚĆ WKŁAD W ANALIZATORZE

Umieść wkład w analizatorze Mastatest kodem zwróconym w dół i w kierunku tylnej ścianki urządzenia.

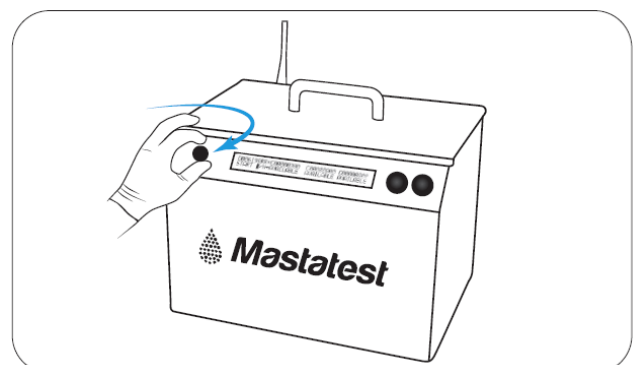

### 5 | ROZPOCZNIJ TEST

Wpisz numer krowy. Naciśnij START żeby rozpocząć test. Wyniki zostaną dostarczone za pośrednictwem e-mail w ciągu 24 godzin.