


COMMENT PRÉLEVER UN ÉCHANTILLON DE LAIT




1 | ÉTIQUETER LE TUBE

Notez le numéro de la vache, le quartier et la date sur le tube. Utilisez des gants propres.

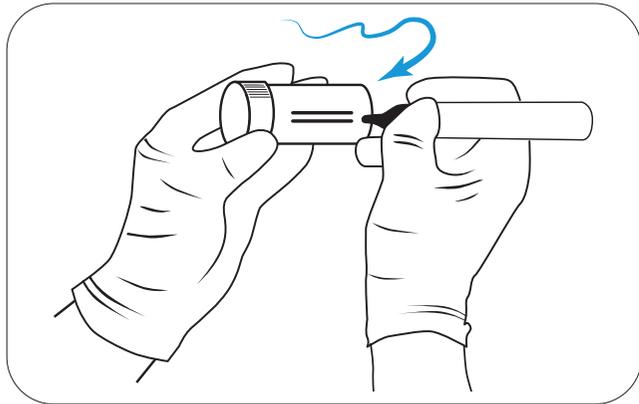


2 | NETTOYER ET DÉSINFECTER LE TRAYON

Après avoir nettoyé à l'eau et au savon le trayon, désinfectez l'extrémité du trayon avec une lingette ou un coton imbibé d'alcool à 70°C.

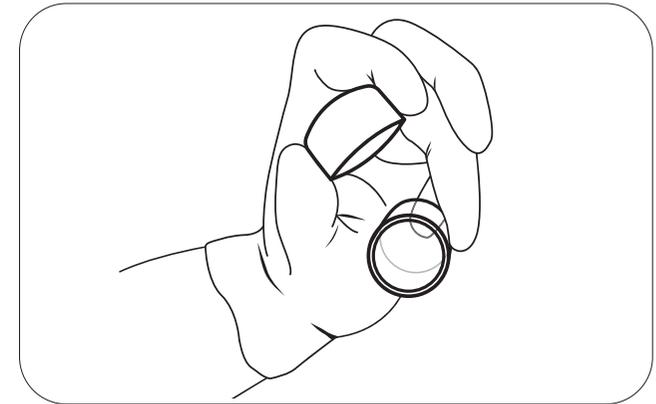


3 | PRÉPARER LE TUBE

Préparez le tube. Retirez le couvercle, en prenant soin de ne pas toucher l'intérieur du couvercle entre votre pouce et votre index.

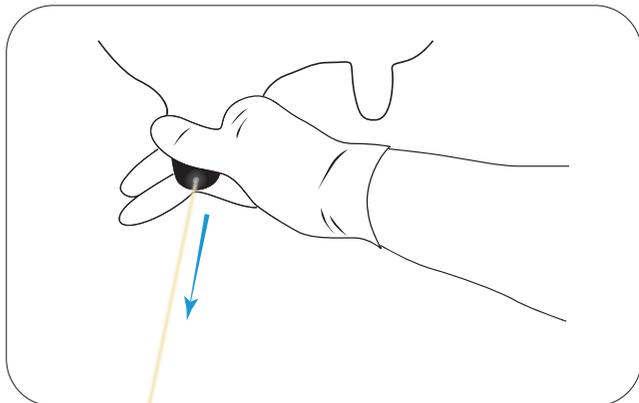


4 | ÉLIMINER LES PREMIERS JETS

Éliminez les 2 ou 3 premiers jets dans un bol à fond noir

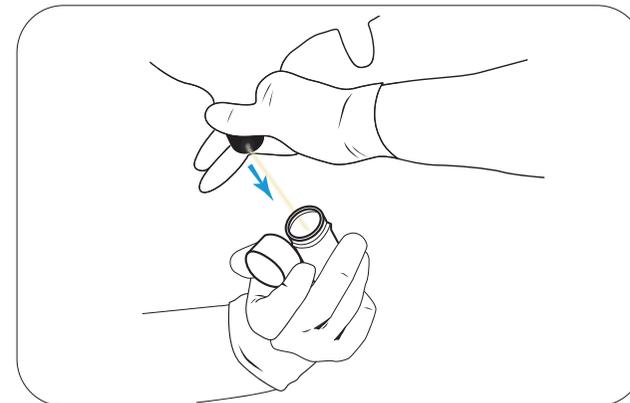

5 | EFFECTUER LE PRÉLÈVEMENT

Insérez la cassette dans l'analyseur en veillant à ce que les flèches qui figurent sur la cartouche soit en face de celles qui figurent sur La Lapbox

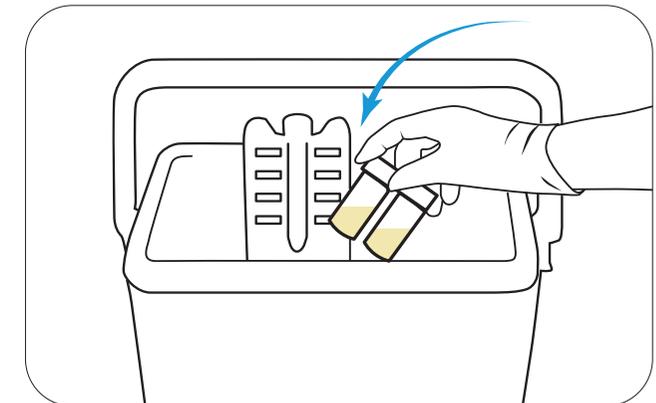

6 | LANCER L'ANALYSE OU RÉFRIGÉRER

Lancez rapidement l'analyse Mastatest®. Ou placez rapidement le prélèvement au réfrigérateur à une température ne dépassant pas les 5°C. Ne pas conserver plus de 48 heures.