

**Mastatest HiSCC
oferuje nowe
możliwości poprawy
zarządzania
zasuszaniem krów
i rzeczywistego
wprowadzenia
selektywnej
terapii.**



Mastatest
HiSCC CARTRIDGES



Identyfikacja bakterii
wywołujących
subkliniczne mastitis



Wytyczne do
odpowiedzialnego
stosowania
antybiotyków



Wsparcie dla
zrównoważonego
zarządzania mastitis
w stadzie



Wynik badania
dostępny już
w 24 godzin



**ACHIEVE
BETTER MILK
TOGETHER**

vetoquinol
ACHIEVE MORE TOGETHER

Protokół HiSCC



1 wkład pozwala na wykonanie jednocześnie badania mleka pobranego od 2 krów w celu optymalizacji kosztów

1.

Wyselekcjonuj krowy ze zbyt dużą liczbą komórek somatycznych w mleku. LKS to dobry wskaźnik subklinicznego zapalenia wymienia. Z pomocą Mastatest zidentyfikuj bakterie wywołujące tę infekcję.

2.

Pobierz próbkę mleka ze wszystkich 4 ćwiartek lub z ćwiartek, w których stwierdzono wysoki poziom LKS do jednej probówki. Następnie wlej próbkę do wkładu HiSCC.

3.

Pozwól Mastatestowi działać: Umieść wkład w Lapboxie, wprowadź numer identyfikacyjny krowy i naciśnij przycisk START.

4.

W ciągu 24 godzin za pośrednictwem poczty e-mail otrzymasz wynik badania i będziesz mógł przedstawić swoją rekomendację dotyczącą leczenia.

Raportowanie: *Staph. aureus*, CNS, inne Gram+ lub Gram-, brak bakterii

Podejmuj świadome decyzje dotyczące zasuszania i przenieś zarządzanie mastitis w stadzie na wyższy poziom

