




1. Załóż czyste rękawiczki i wyjmij podwójny wkład testowy (HISCC) z opakowania.

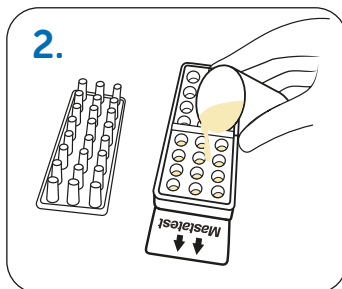


2. Zdejmij pokrywkę wkładu i połóż ją na blacie wypustkami do góry. Napełnij pierwszą część wkładu do połowy badaną próbką mleka.

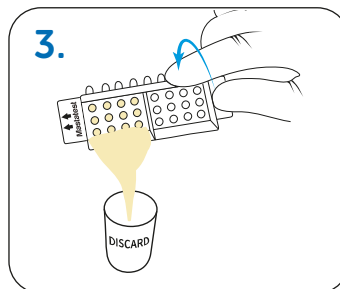


3. Odlej nadmiar mleka z napełnionej części wkładu.

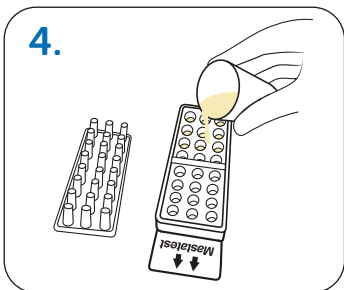


4. Wypełnij do połowy drugą część wkładu kolejną próbką badanego mleka.

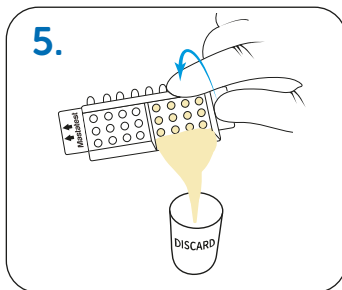


5. Odlej nadmiar mleka z drugiej napełnionej części wkładu.

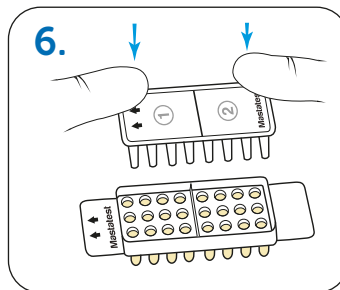


6. Nałóż pokrywkę. Upewnij się, że strzałki pokrywają się z tymi na podstawie. Naciśnij zdecydowanie, aby zamknąć wkład.

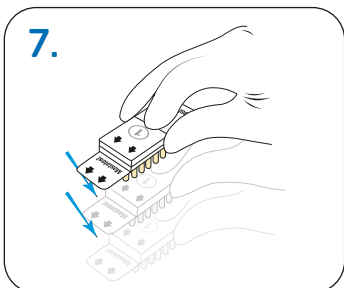


7. Postukaj wkładem o blat 3-4 razy, aby usunąć pęcherzyki powietrza.

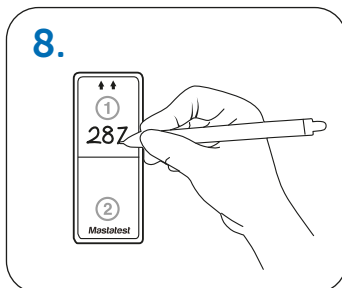

8. Oznac pokrywkę wkładu odpowiednimi numerami krów dla próbek 1 i 2.

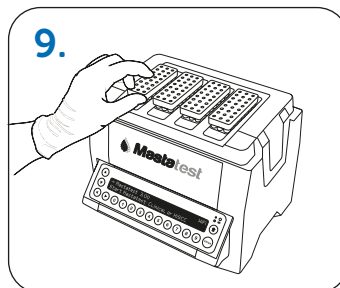

9. Włóż wkład testowy do Lapbox strzałkami skierowanymi w tył. Załóż pokrywkę.

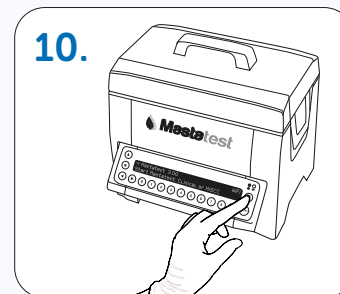

Początek:

- Z menu głównego Lapbox wybierz **Start Mastatest**
- Wybierz pozycję testu: Jeśli będzie to pierwsza wolna lub nawiguj żeby wybrać inną i potwierdź
- Naciśnij żeby wybrać **HISCC**

Opcja 1: BoxStart

- Wybierz **BoxStart**
- Wpisz numer krowy (np. 00123) i dalej żeby wybrać ćwiartkę
- Potwierdź Start

Opcja 2: WebStart

- Naciśnij żeby wybrać **WebStart**
- Uzupełnij szczegóły testu w portalu vetoquinol.mastatestsystem.com tak szybko jak to możliwe

Kolejne kroki:

- Zegar będzie odliczał czas pozostały do zakończenia testu
- Wyniki będą dostarczone mailem w ciągu 24 godz.
- Kolejne testy mogą być wykonywane niezależnie

